

HIRO SWINE® B液 取扱い説明書

希釈液の保存 冷蔵保存で1ヶ月保存、使用可能です。

一度温めた希釈液は再度冷蔵保存して使用可能です

※(出来るだけ使いきる方が良いです)

保存方法 インキュベーターにて定温保存(16°C17°C前後)

3日に1度の、ゆるやかな攪拌

検査方法 別紙にて明記

※以前の希釈液よりも検査時、固まりが目立つと思います

しかし、HIRO SWINE B液は直進性に極めて優れており

子宮への到達時間は、極端に短くなると思われます。

(その事により、到達精子数も極めて増加し着床率、産子数に

良好な影響をあたえることと思います。)

スワインジェネティクス株式会社